



PROSER

CLINIC

FICHA TÉCNICA CUBRE BARANDILLAS Ref. 553 y CUBRE BARANDILLAS DOBLE Ref. 1553.

INDICACIONES

Protector acolchado para barandillas de cama. Protege al paciente de golpes contra las barandillas e impide introducir los brazos y piernas entre las barras de las mismas.

INSTRUCCIONES DE USO

Abrir los cierres de clip y colocar el protector en la barandilla. En el protector sencillo, colocarlo en la parte interior de la barandilla, cerrar los cierres por la parte exterior y ajustar las cintas para evitar su desplazamiento.

| | | |
|--------------------|--|---|
| TALLA | Única | Medidas acabado ref.553 aprox.: 150x38x3,5 cm Medidas acabado ref.1553 aprox.: 2 piezas 150x38x3,5 cm |
| COMPOSICIÓN | Funda exterior: <ul style="list-style-type: none">• Poliuretano de tapicería Ignífugo (M-2) Relleno: <ul style="list-style-type: none">• Goma-espuma de alta densidad. | |
| LAVADO | | Lavado: <ul style="list-style-type: none">• Lavar con una esponja o paño húmedo enjabonado.• Usar solo jabón neutro.• Enjuagar con agua limpia.• No usar disolventes, blanqueadores, detergentes químicos o sprays abrillantadores. |



Envíos gratuitos

en compras superiores a 100€ (IVA Incluido)

Incluso con productos de oferta o promoción